

取扱説明書

説明書

小物品エイドは、グラブ部分と掌パッドの二つの部分から構成されています（図を参照）。小物品エイドを使えば径の小さい小物品をしっかりと握ることができ、掌パッドは簡単に交換ができるので、バスルームセット、アートやオフィス用品をすぐ使えるように準備しておくことができます。

グリップエイドはすでに掌パッドが取り付けられた状態でお届けしますので、グリップエイドを装着した状態がご覧になれます。

グリップエイドを装着するときは、必要に応じて図を参照しながら下記の指示に従ってください。


グラブ部分の装着

1. 両方のマジックテープのストラップを外します。
2. グラブを手にかぶせ、親指を穴に差し込みます。
3. リングを用いて手首ストラップを締め、マジックテープで留めます。
4. 次に、手の上方周りのストラップを締めます。
5. グラブの手の部分のマジックテープ上に掌パッドを置きます。掌パッドの角度は自由にセットできます。



掌パッドの準備

1. プラスチック部分の上を横切るマジックテープのストラップをはがします（必要に応じてリボンループを使ってください）。
2. プラスチック部分を離します。
3. 握りたい小物品をプラスチックのクランプ間に挿入します。
4. リボンループを使ってストラップをしっかりと引き、マジックテープを留めます。
5. さまざまな物を別々の掌パッドで使用する場合、この手順を繰り返して全部を固定します。

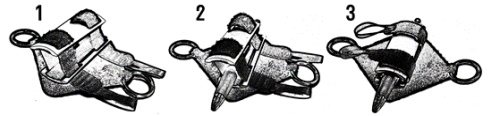

注意点

当グリップエイドが適しているかどうか分からない場合は、使用前に医師、療法士、医療関係者に問い合わせてください。

グリップエイドを装着して使用する場合は常にこの説明書の指示に従ってください。

- 小物品エイドは重量品を握るように設計されていませんので、重量品に使った場合は製品またはユーザーが損傷をこうむることがあります。
- 一時的に意識不明になることがある方は、グリップエイドを使用して鋭利な物を握らないでください。
- グリップエイドを高温の物を握るのに使用したり、直火のそばで使用したりしないでください。
- かみそりの刃や工作用ナイフのような鋭利な物を握るためにグリップエイドを使用する場合は充分注意してください。
- グリップエイドに破損が生じた場合は使用しないでください。